

Fototerapia UVB Banda Estrecha en el Hogar para Psoriasis, Vitiligo & Eczema

# SolRx<sup>TM</sup> Serie 1000

Panel de Cuerpo Completo

Dos simples soportes fijan el equipo a una pared plana o en una esquina para minimizar espacio en el piso. El equipo tiene solo 8.9 cm (3-1/2") de espesor. Se incluye todo el herraje. La instalación toma menos de 10 minutos

Temporizador regresivo digital confiable de 0-20 minutos con balastro clasificación UL 10 Amp. La pantalla de LED roja es fácilmente visible mientras se usan las Gafas UV

Los reflectores de aluminio anodizado aumentan la salida de luz UVB. Las secciones parabólicas de las lámparas en los extremos mejora la salida periférica

Interruptor con llave para prevenir el uso no autorizado

Lámparas de 6 pies de largo Philips TL100W/01 UVB Banda Estrecha o FS72T12/UVB/HO UVB Banda Ancha. Estas son exactamente las mismas lámparas que usan las clínicas de fototerapia.

Para reparaciones a largo plazo, el equipo está construido con componentes eléctricos comunes no exclusivos y un mínimo de partes plásticas.


Construcción de acero calibre 20 y pintura pulverizada sólidamente sujetados con contratueras de nylon para durabilidad.

Las rejas de protección con bisagras se abren para la limpieza de las lámparas

Usa alimentación eléctrica estándar. No requiere electricidad especial.

Las lámparas están diseñadas lo más cerca del piso posible para minimizar la necesidad de usar plataforma para el paciente tratar la baja pierna.

Las patitas de goma descansan sobre el suelo.

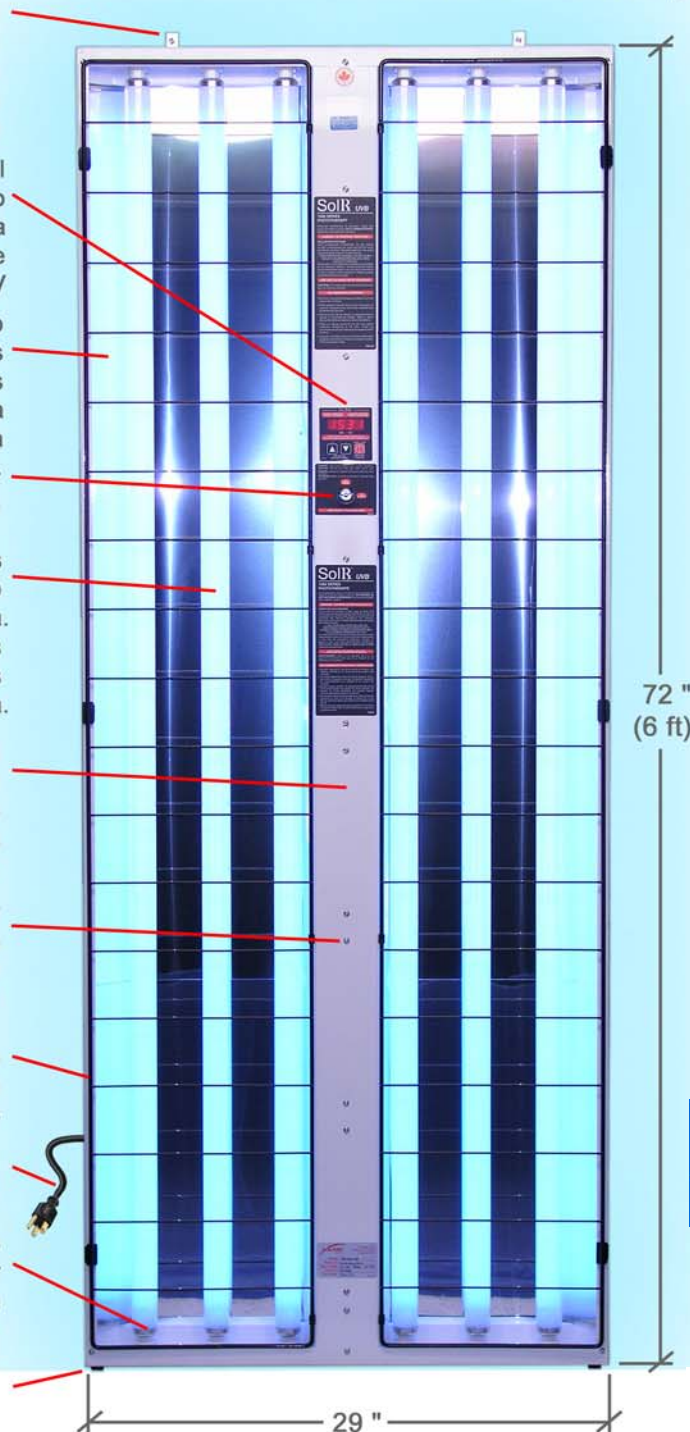

**PHILIPS**

UVB-Narrowband

Modelo  
1760UVB-NB  
6 Lámparas,  
600 Vatios

El **SolRx Serie 1000** es un Panel de Cuerpo Completo **UVB-Banda Estrecha** o **UVB-Banda Ancha** para el tratamiento de psoriasis, vitiligo y eczema. Tiene una área de tratamiento de 73 cm x 183 cm [29" x 72"], (93.54 centímetros cuadrados (14.5 pies cuadrados).

Desde el 1992, estos notables equipos han proporcionado alivio a miles de pacientes en todo el mundo. El Serie 1000 se ha convertido en el estándar de-facto para fototerapia UVB costo-efectiva para cuerpo completo.




# SolRx Serie1000 Panel de Cuerpo Completo - 6 Pies




El equipo usualmente se monta plano en la pared con dos soportes




También se monta en una esquina. La parte inferior reposa en el piso.

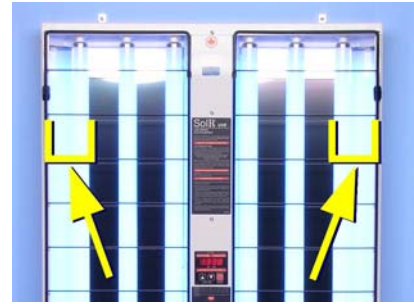

Los reflectores parabólicos de afuera dan mejor cobertura a sus lados.

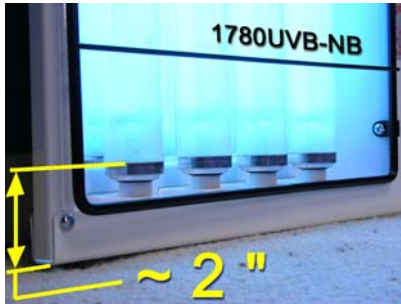

Las lámparas están muy cerca del piso para reducir necesitar plataforma

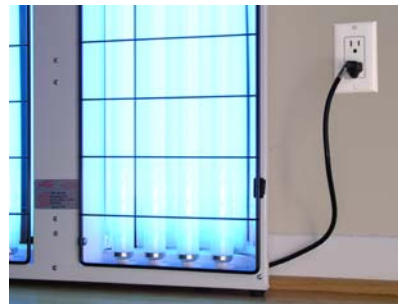


El equipo usa un tomacorriente estándar de 3-dientes. (120 Volt AC)



El equipo puede aceptar los tres tipos de lámparas de fototerapia ultravioleta



El temporizador digital e interruptor son características de seguridad importantes

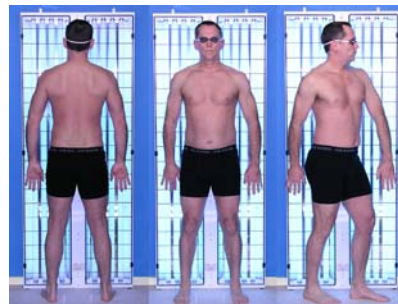

Algunas posiciones de tratamiento. Todas a 20-30 cm de las lámparas.



Es compacto y con un peso razonable. Una persona puede manejarlo.

Veinte años de experiencia han probado que el **SolRx Serie 1000** es una conveniente, efectiva y económica alternativa a la fototerapia de hospital. Todos los modelos vienen completamente ensamblados y con lámparas nuevas, gafas protectoras UV, kit de instalación y exhaustiva Manual del Usuario con guías de exposiciones para psoriasis y vitiligo. No hay nada más que usted necesite comprar. Por favor visite [SolarcSystems.com](http://SolarcSystems.com) para mucho más información o fotos.

Dimensiones (centímetros): 73.7 x 8.9 x 182.9 de altura (equipo solamente)  
 Peso: 60 a 74 libras (modelos 1740 a 1790, equipo solamente)  
 Electricidad: Usa toma de 120Volt - 3 clavijas con tierra, max 8 amps (1790)  
 Garantía en el Hogar: 4 años en el equipo, 1 año en las lámparas; más nuestra Garantía de Llegada

Todos los modelos cumplen con la FDA de EEUU y Health Canada .

Las leyes Federales de EEUU restringen este equipo a venta por u orden de un médico.

Cuatro modelos **UVB-Banda Estrecha**:  
 1740UVB-NB: 4 lámparas, 400 vatios  
 1760UVB-NB: 6 lámparas, 600 vatios  
 1780UVB-NB: 8 lámparas, 800 vatios  
 1790UVB-NB: 10 lámparas, 1000 vatios

Dos modelos **UVB-Banda Ancha**:  
 1740UVB: 4 lámparas, 400 vatios  
 1760UVB: 6 lámparas, 600 vatios  
 Los tipos de lámparas son intercambiables.  
 También disponibles en UVA & UVA1.



Solarc Systems está certificado ISO-13485 para el diseño & fabricación de equipos médicos de fototerapia ultravioleta.



Envíenos su nombre, teléfono, ciudad y país. Un representante de Solarc se comunicará con usted en español lo antes posible.

Correo: [ventas@SolArcSystems.com](mailto:ventas@SolArcSystems.com)

**SolArcSystems.com**

